



**Especialista em você.**

**TOPÓGRAFO DE CórNEA RM**

---

**Ramos Mejia Comércio Importação e Exportação Ltda.**  
Rua Estela, 515 - Bloco C - Conj. 31 - Bairro Vila Mariana  
São Paulo - SP - CEP: 04011-904



## Topógrafo de Córnea RM

Equipamento para análise e diagnóstico da córnea

### RECURSOS E BENEFÍCIOS

---

Marca:



Garantia:



# DADOS TÉCNICOS

---

## Topógrafo de Córnea RM

### Equipamento para análise e diagnóstico da córnea

\* Necessário uso de computador para funcionamento do equipamento

\*\* Produto não acompanha computador

\*\*\* Entrar em contato para informações sobre a configuração mínima necessária do computador

### Dados Técnicos

**Método de medição:** Anéis de Plácido

**Anéis de Plácido :** 29 anéis

**Pontos de medição:** 10.440 pontos

**Limite de medição:** 9 a 11 mm

**Medição raio de curvatura:** 5,5 a 10 mm

**Limite dioptria:** 33,75D a 61,36D

**Peso:** 15 kg

**Medidas:** 510 x 340 x 320 mm

**Voltagem :** Bivolt

### Disco de Plácido



O Topógrafo RM usa o princípio de anéis de plácido para efetuar a medição da


ceratometria e da topografia da córnea para uma análise sistêmica do formato da superfície anterior da córnea e da ceratometria

### **Preciso e completo !**




Possui 29 anéis de Plácido com 10.440 pontos de leitura.  
Resultados mais seguros e precisos.

### **Diversos Mapas**

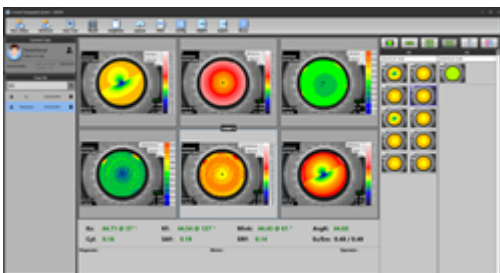


O Topógrafo RM possui os principais mapas que podem ser alterados em um só click. São eles : Axial , Tangencial , Elevação e Refracção

## Fácil busca e centralização da córnea

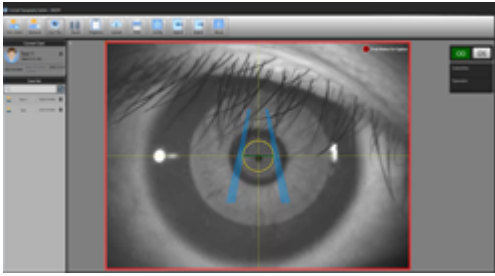


O Topógrafo RM possui linhas guias para auxiliar e facilitar o foco e centralização da córnea.

## Auto Measure

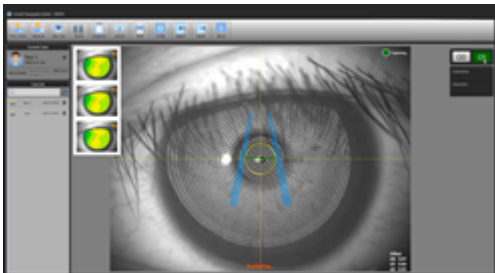


O Topógrafo RM possui o sistema "Auto Measure" que efetua automaticamente as imagens da córnea após a devida centralização da córnea por parte do operador. É possível configurar que o programa efetue automaticamente até 8 imagens sequenciais

## Software amigável

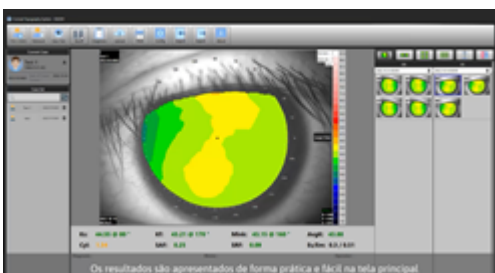


Todas as imagens do olho direito e do olho esquerdo aparecem na mesma tela principal Tornando fácil a escolha e manipulação por parte do operador.

## Diagnóstico de erros refrativos

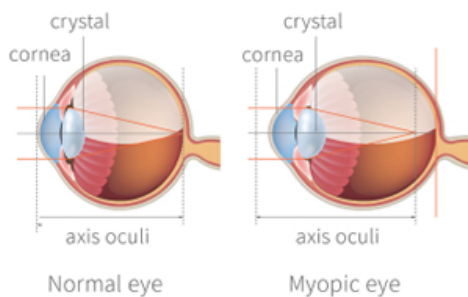


Através da verificação dos mapas topográficos é possível analisar erros refrativos dos pacientes. Essa verificação pode auxiliar no diagnóstico caso a causa seja a córnea.

## Triagem de Ceratocone

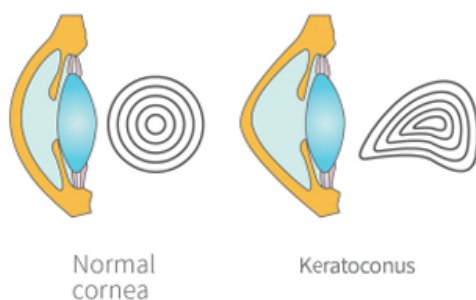


O topógrafo RM pode gerar a topografia corneana com base nos dados da superfície anterior da córnea através dos anéis de plácido. Através de nosso avançado software é possível gerar indicadores para auxiliar de forma rápida a triagem do Ceratocone.

## Software de gerenciamento

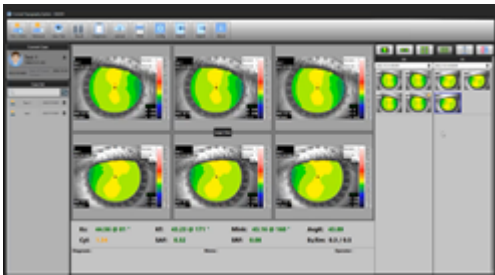

O software de gerenciamento de pacientes permite armazenar os dados e mapas dos vários atendimentos feitos , gerando um histórico de cada paciente ao longo do tempo

## Acompanhamento pós cirúrgico

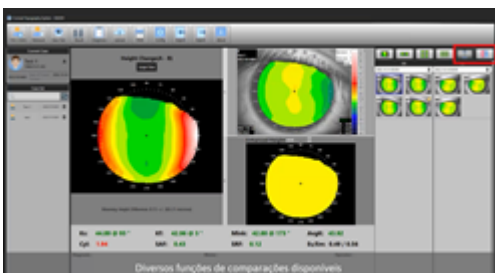


Através da comparação pré e pós cirúrgica de mapas corneanos é possível analisar graficamente a efetividade da cirurgia , bem como o processo de melhoria do paciente.

## Adaptação de lente oftálmica




O topógrafo RM também possui uma função para auxiliar na adaptação de lentes oftálmicas

## Completo

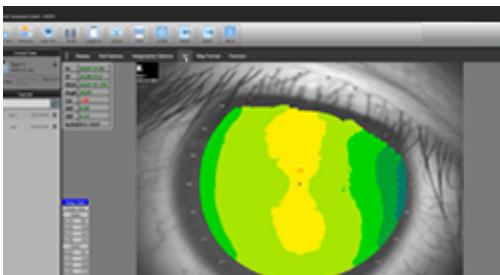

O topógrafo RM uma ampla gama de filtros, mapas especiais e funções que podem ser acessadas diretamente em uma mesma tela do software .

## Relatórios rápidos e customizáveis

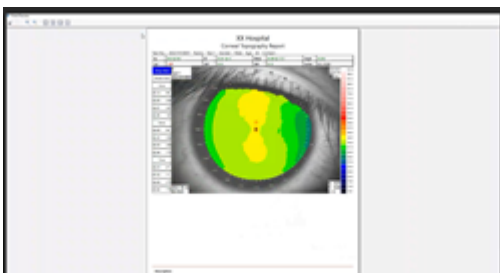

É possível gerar relatórios para impressão ou para arquivos em PDF de qualquer mapa disponível de forma rápida e prática.







**Para mais informações:**

**(11) 5572-5219**

**(11) 2649-1809**

**(11) 99675-3874**

**[www.ramosmejia.com.br](http://www.ramosmejia.com.br)**